

Ideato e sviluppato
in Australia per la sicurezza
negli sport da contatto.



MYOFUNCTIONAL RESEARCH CO.
- designers and manufacturers of innovative dental appliances -
EUROPE • USA • AUSTRALIA

Disponibile
anche con
aggancio
per il casco.

La migliore protezione per denti
e mascelle.

Dispositivo M.O.R.A.
per le massime prestazioni
sportive

Studiato per evitare lesioni negli
atleti con attacchi ortodontici.

ISASAN srl - Rovello Porro (COMO)
info@isasan.com www.isasan.com

POWRGARD 4-BRACES™

Efficace protezione per atleti
con attacchi ortodontici

Durante la terapia ortodontica

Dagli 11 anni

PARADENTI
ad arcata singola

PROTEZIONE E PRESTAZIONI
COME UN BITE PERSONALIZZATO

Consigliato dalla SOCIETA' ITALIANA di TRAUMATOLOGIA DENTALE


POWRGARD 4•BRACES™

Per sportivi con attacchi ortodontici.

Consigliato dalla SOCIETA'
ITALIANA TRAUMATOLOGIA DENTALE

- 1 Alloggiamento per attacchi ortodontici: protegge dai traumi e mantiene il paradenti in posizione corretta
- 2 Lamella linguale per l'ottimale posizione della lingua.
- 3 Base a cuscinetto d'aria per proteggere l'articolazione temporo-mandibolare

Sezione che mostra l'incavo per i bracket, la lamella linguale e la base a cuscinetto d'aria.

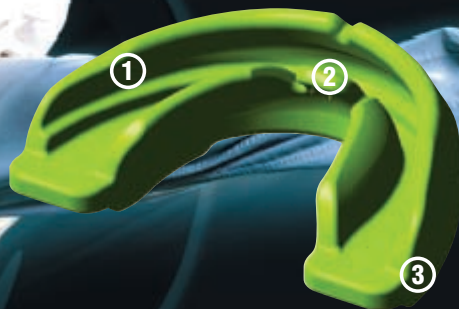

Sistema M.O.R.A. per le massime prestazioni


Come i bite su misura realizzati per gli atleti professionisti, POWRGARD 4•BRACE fa parte dei dispositivi "M.O.R.A." (Mandibular Orthopaedic Repositioning Appliance), in grado di mantenere costantemente l'atleta al 100% del potenziale, semplicemente ottimizzando la posizione mandibolare. Questo equivale ad aumentare la forza fisica fino al 30%.

POWRGARD 4•BRACES™

Istruzioni per la personalizzazione

POWRGARD 4•BRACES è immediatamente utilizzabile. Per i migliori risultati, si suggerisce di personalizzarlo.

La personalizzazione richiede solo **2 minuti** ed è più agevole se effettuata davanti allo specchio. Si suggerisce di eseguire una prova. Preparare acqua bollente in una scodella, un cucchiaino, uno specchio ed un contasecondi.

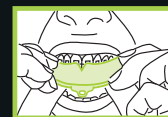

1. Immergere 4•BRACE in acqua bollente per **45 secondi**.
2. Rimuovere dall'acqua servendosi di un cucchiaino.
3. Davanti allo specchio, posizionare 4•BRACE (lamella linguale rivolta verso l'alto), facendolo aderire all'arcata superiore. Assicurarsi che il dispositivo sia allineato con la linea centrale dei denti.
4. Inserire l'arcata inferiore nella base di 4•BRACE. Chiudere **delicatamente** la bocca.
5. Adattare con le dita i bordi superiori dispositivo.
6. Appoggiare la lingua sulla lamella linguale e aspirare con forza, succhiare con forza aspirando tutta l'aria per **20 secondi**.
7. Rimuovere delicatamente 4•BRACE e raffreddare con acqua corrente per **10 secondi**

Riprovare 4•BRACE per verificarne l'adattamento. Ripetere la procedura qualora 4•BRACES si dovesse deformare. 4•BRACES può essere rimodellato più volte. Non immergere 4•BRACES nell'acqua durante l'ebollizione.

CONSERVAZIONE E PULIZIA

- Rimuovere sempre con delicatezza - Risciacquare con acqua fredda o tiepida prima di riporre il prodotto - Pulire con spazzolino e dentifricio - Riporre nel suo contenitore.